

Box adressiert mit  
Swiss-Express „Mond“ /  
Carton avec étiquette  
d'adresse avec Swiss-  
Express «Lune»

Saugfähiges  
Material /  
Matériel  
absorbant

2 Gefässe /  
2 récipients


Kleber /  
Autocollant  
UN 3373

Beutel für  
2 Gefässe /  
Sachet pour  
2 récipients

US-Antrag /  
Demande  
d'analyse

- Gewebe in Gefässe füllen,
- Gefässe gut zudrehen,
- Gefässe und saugfähiges Material in Beutel geben,
- Beutel verschliessen,
- Antrag ausfüllen, 2x falten und belegen,
- per Express versenden (Swiss-Express „Mond“).

- Mettre le tissu dans les récipients,
- Bien fermer les récipients,
- Mettre les récipients et le matériel absorbant dans le sachet,
- Fermer le sachet,
- Remplir la demande d'analyse, la plier 2x et la mettre dans le carton,
- Envoyer par exprès (Swiss-Express «Lune» ).

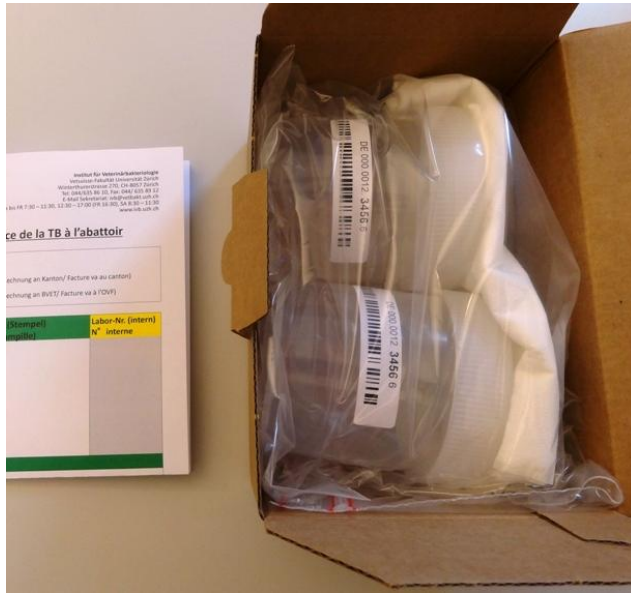

### Variante 1:

- Für 1 Tier
- 2 Gefässe  
(2. Gefäss leer versenden, wenn nur eine Gewebeprobe genommen wird)
  
- Pour 1 animal
- 2 récipients  
(Envoyer le 2<sup>ème</sup> récipient vide s'il n'y a qu'un échantillon de tissu prélevé)



### Variante 2:

- Für 2 Tiere
- 2 Kartonboxen à 2 Gefässe
- 4 Gefässe insgesamt
- Boxen können mit Klebeband o.ä. zusammengeklebt und gemeinsam versandt werden.
  
- Pour 2 animaux
- 2 boîtes en carton avec 2 récipients chacun
- 4 récipients en tout
- Les cartons peuvent être collés ensemble avec une bande adhésive par ex. et être envoyés ensemble.