



Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI), Länggassstrasse 122, casella postale,
3001 Berna



ISTRUZIONI Campionatura di tamponi alla milza o al sangue nei cinghiali (peste suina africana)

CONTENUTO DEL KIT

- 1x tampone in provetta numerato
- 1x istruzioni Campionatura di tamponi alla milza o al sangue
- 1x sacchetto di plastica per la provetta con tampone
- 1x sacchetto di plastica con un paio di guanti
- 1x materiale assorbente
- 1x busta in cartone UN3373
- 1x scheda dell'animale
- 1x sacchetto di plastica per la scheda animale

PROCEDIMENTO


1. Indossare i **guanti**
2. Estrarre il **tampone**

Tampone sangue

- Il tampone può essere imbevuto con sangue o fluidi contenenti sangue servendosi delle cavità presenti nel corpo dell'animale. Negli abbattimenti selettivi è possibile inserirlo in un foro di proiettile per prelevare il sangue.

Tampone milza

- Praticare un taglio nella cavità addominale sinistra servendosi di un coltello affilato (immagine A)
- Estrarvi la milza, organo dalla forma allungata, carnoso e di colore violaceo scuro posizionato accanto alle anse intestinali (immagine B)
- Svitare ed estrarre il tampone dalla provetta
- Spingere il tampone nella milza esercitando sufficiente pressione (immagine C)
- Una volta perforata la superficie della milza il tampone assume un colore sanguigno. Ripartire il liquido in modo omogeneo ruotando il tampone
- Estrarre il tampone verificando la presenza di una cavità profonda nella milza (immagine D)
- Reinscrivere il tampone nella provetta e **avvitarlo fino in fondo** (immagini E & F). Pulire la provetta se necessario.

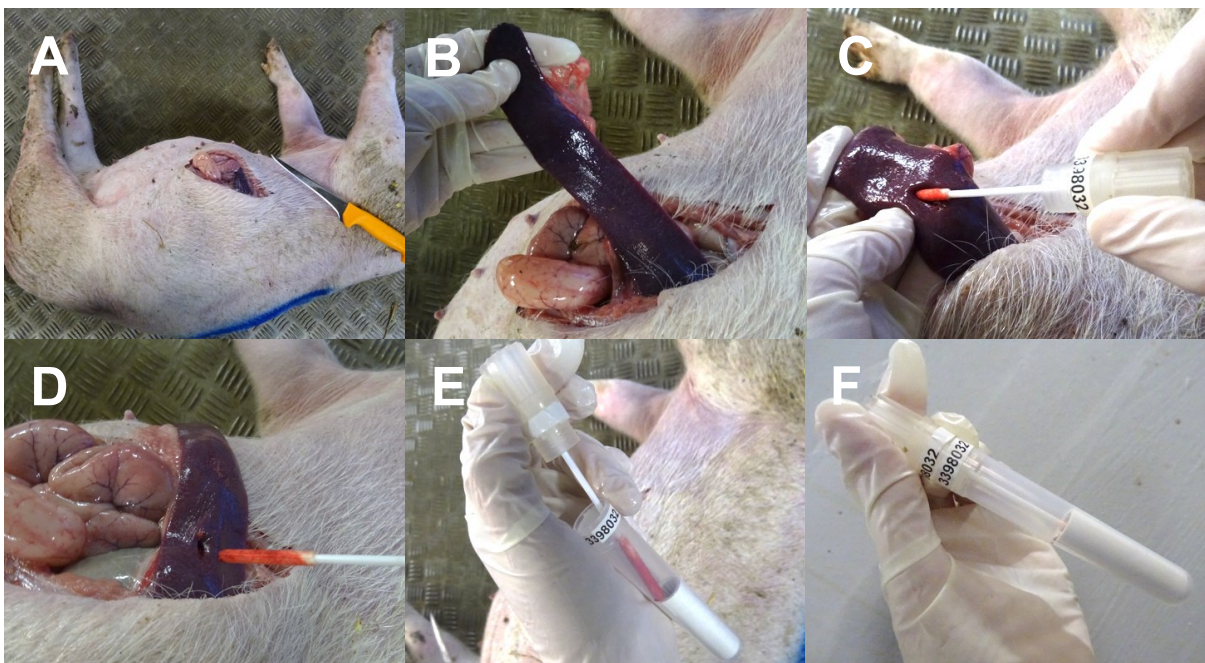

- **Smaltire il materiale monouso:** sfilare i guanti e smaltirli insieme alla confezione del tampone servendosi del sacchetto in plastica
- Compilare la **scheda**
- Inserire nella busta UN3373 (v. immagine sotto) la scheda dell'animale (nel sacchetto di plastica) e il tampone con il materiale assorbente (nel sacchetto di plastica) e inviarla

CONSERVAZIONE

Inviare il **prima possibile** i campioni. Qualora ciò non fosse possibile, conservarli a 4° C per massimo una settimana.

INVIO / INDIRIZZI



Tamponi sangue / milza:	Animali interi e ossa:
Istituto di virologia e di immunologia Diagnostica PSA Sensemattstr. 293 3147 Mittelhäusern	Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI) Diagnostica animali selvatici Länggasstr. 122, casella postale 3001 Berna O rivolgersi a un altro laboratorio designato dall'ufficio veterinario cantonale

CONTATTI

Per domande inerenti i tamponi sangue / milza:	Per domande di altro genere:
Contatto: dia-mitt@ivi.admin.ch Istituto di virologia e di immunologia Sensemattstr. 293 3147 Mittelhäusern Tel.: 058 469 92 11	Contatto: fiwi.wilddiagnostikvetsuisse.unibe.ch Istituto per la salute dei pesci e della fauna selvatica (FIWI) Länggasstr. 122, casella postale 3001 Berna Tel.: 031 631 24 00

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE!